

## バクテリオキラーEX導入のメリット



- 1.センサーに手をかざすだけですぐに流水による洗浄・除菌を同時に行う事が出来る。
- 2.15秒で自動停止。人によるバラつきがないので確実な除菌が可能。
- 3.金属・皮フへの影響がほとんどない。
- 4.高い除菌性能と広いスペクトル。
- 5.希釈・調整の必要がない。
- 6.他の薬剤と比べ低コスト。
- 7.手洗い石鹸との併用が可能。

### バクテリオキラーEX

標準価格 1台

**¥248,000** (税別)

※バクテリオキラーBK-EXは株式会社オフトの登録商標です。  
(登録第5684341号)

外形寸法	W310×H310×D120mm(卓上・壁掛け)
乾燥時重量	4.5Kg
電源	単相100V(50/60HZ)
消費電力	最大定格90W 待機時5w
給水	上下水質基準適合
	水圧 0.2~0.75MPa 水温 5~30℃ 20%
生成水有効塩素濃度	ノーマルモード 15ppm /ハイモード 30ppm
次亜塩素酸水生成量	約1L/15sec (水圧により多少の変動あり)
BBK原液消費量	約2cc/15sec (水圧により多少の変動あり)
運転方式	センサー感知による15秒運転・フットスイッチによる運転(別売)
設置環境	換気装置がある場所・100V電源と給排水設備のある場所
製造元	株式会社 オフト 東京都杉並区善福寺4丁目5番10号

※本器は医療機器ではありません。BK-EX水は飲料ではありません。



### BBK-EX(専用原液)

標準価格 10ℓ1ケース

**¥18,000** (税別)

この専用原液をBK-EX本体で電気分解を行い次亜塩素酸水を流水式で生成します。

10ℓのBBK-EX専用原液で5,000ℓのBK-EX水が生成されます。 ※BBK-EX専用原液は他の機械ではお使い頂けません




BK-EX本体の補充ボトルへBBK-EX補充液を補充します。



BK-EX本体へセットします。



スイッチを入れればセンサーに手をかざすだけで除菌水が生成されます。

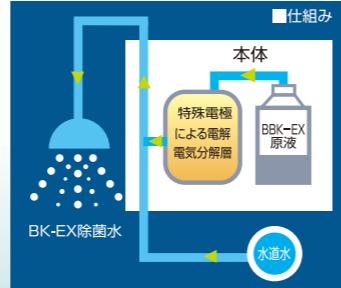

## ご採用医院様の声

### ■越智歯科医院様

**【希釈型の薬品をやめ、BK-EX水を使用しています。】**

肝炎の患者さんの治療後のチェアの清掃や器具の洗浄消毒など、とても役立っています。水道水の感覚で使用できるのが良いと思います。使い勝手が大変良いので気に入っています。

### ■高橋矯正歯科クリニック様

**【手をかざすだけの簡単さが気に入っています。】**

看護師が多いので手洗いには時間もコストもかなりかかる。BK-EXは非常に簡単に手指洗浄ができる。薬液は薄めたり面倒だが、BK-EXは手をかざすだけで簡単。うちでは色々な器具も補助的に洗浄しています。

### ■堺歯科医院様

**【バキュームチップの洗浄、根管洗浄に使用しています。】**

主に、器具セットの洗浄、手指や口腔内の洗浄/バキュームチップの洗浄に使用しています。根管洗浄にも使用していますが今のところ問題なく良い状態が続いています。

### ■大阪東歯科様

**【幅広い用途に使用できるうえ、手荒れもなくなりました。】**

主に器具の洗浄を中心に使用しています。オートクレーブにかけられない器具が多いのですが、その消毒にBK-EXをつかうようになってからは時間も短時間で済むようになり非常に助かっています。また、最近は患者さんの口腔内の消毒にも使用し始めました。そのつど調合する手間が必要ない上、スイッチ一つでいつもBK-EX水を容器に取ることができるので大変便利です。

### ■山之上歯科様

**【抜歯前後のうがいや、外科用器具の洗浄に使用しています。】**

流水式なので水道水のような感覚で手軽に使えるところが気に入っています。患者さんには、抜歯前後にBK-EX水でうがいを2回程度行ってもらっています。他には器具をBK-EX水で洗浄した後にオートクレーブにかけて消毒しています。

### ■ホワイトデンタルクリニック様

当院では器具セットの洗浄、手指やバキュームチップの洗浄にBK-EX水を使用しています。また、助手の方たちはBK-EX水の使用によって石鹸やアルコールを使う手間が省けたので、助かっています。

### ■大矢デンタルクリニック様

**【やはり、流水で洗えることが一番のポイントです。】**

理想としては、やはり流水で手を洗うことが大切だと思います。器具洗浄は、現状のオートクレーブ消毒が主流ですが、ミラーやプラスチック製品は一般的に消毒しにくく、これからは流水下で洗い流す洗浄方法を取り入れることになると思います。

### ■内藤デンタルオフィス様

**【患者さんにも喜んでもらっています。】**

今まではチェア回りの消毒に時間がかかっていたので患者サービスという点でもBK-EXを使用することで改善されました。器具洗浄、根管治療、抜歯後の洗浄、フラップOP(小手術)等の消毒及び洗浄に使用しています。BK-EXは手軽に除菌効果水が生成でき、しかも幅広く使えるので気に入っています。

### ■竹中駅前歯科様

**【抜歯時に使用すると、腫れが非常に少なくてすみます。】**

手袋をはめることを基本にしていますが、患者間の感染を考えると、その上からも十分洗浄消毒する必要があります。BK-EXで洗浄するとニオイも除去できるので大変使いやすいです。その他の利用としては抜歯時等や根管治療に利用していますが、BK-EXで洗浄すると腫れが非常に少なく、治療しやすいです。

### ■山田デンタルクリニック様

**【器具洗浄の他、口内炎の治療にBK-EX水を使用しています。】**

以前は手指消毒には〇〇〇〇、〇〇〇〇〇等を使用しておりましたが、スタッフの手荒れが気にかかっておりました。その時BK-EXの話を聞き説明を受けたところ、他の消毒剤と比べ徹底的に殺菌力に優れている、皮膚刺激が少ない、コストも低減できることからBK-EXを導入し使用しています。使用後はスタッフの手荒れもなくなりました。水道感覚で使用できるので気に入っています。現在は器具除菌と患者さんへの治療に使用しています。器具についてはBK-EXを入れた超音波洗浄器にかけた後、オートクレーブ滅菌を行っています。また患者さんへの治療には外科手術の前夜や根管治療にBK-EX水を使ったり、口内炎の患者様へはBK-EX水を持ち帰らせうがいを行う事をすすめています。その他、診療室のチェアや床の清掃など使用用途が広く便利に使用しています。

■ご注文は信頼のある

# BAKTERIO KILLER EX 新発売

流水式電解次亜塩素酸水生成器バクテリオキラーEX

器具の浸漬が行えるハイモードが加わり  
更に進化、更に強化、更に安心・安全  
今度のバクテリオキラーはC型肝炎ウイルスにも！！



**BSA**

【発売元】株式会社ビーエスエーサクライ  
〒468-0022名古屋市中区高島一丁目117番地1

TEL.052-805-1181 FAX.052-805-1182 <http://www.bsa-sakurai.co.jp>